




SMART PRODUCTS  
FOR ENDO LOVERS

# IrriFlex<sup>®</sup>

## Quick User Guide


Biegsame 30G-Einweg-Wurzelkanalspünnadel mit  
2 seitlichen Back-to-Back-Öffnungen

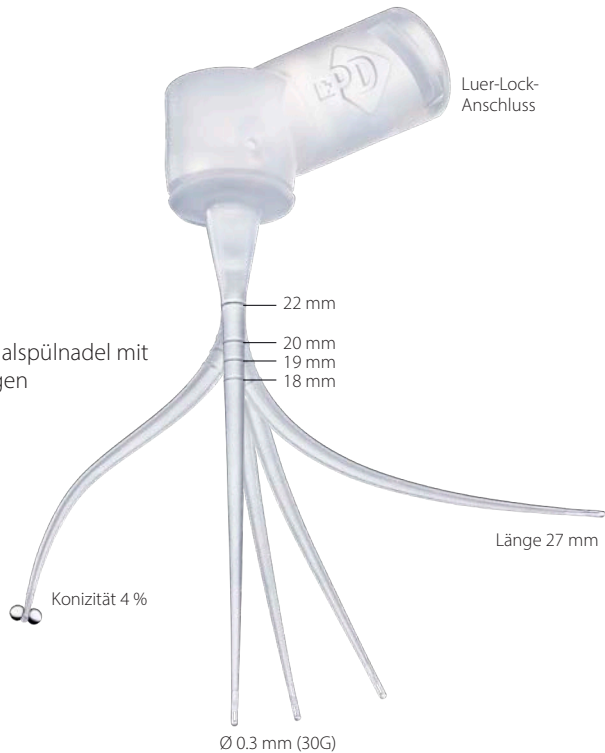

# Anweisungen zur Einrichtung



1. Öffnen Sie die Verpackung, indem Sie an der dafür vorgesehenen vorgestanzenen Einkerbung entlang ziehen.
2. Füllen Sie Ihre Spritze mit Luer-Lock-Anschluss mit einer der kompatiblen Flüssigkeiten vor: (erhitztes) stabilisiertes NaOCl bis zu 6 %, EDTA 17 %, Chlorhexidindigluconat 2 %, Zitronensäure bis zu 40 %, destilliertes Wasser.

 **Anmerkung:** Dual Rinse® HEDP ist ebenfalls eine kompatible Lösung.



3. Stecken Sie das Konnektorteil der Nadel in die männliche Nase der zuvor gefüllten Spritze mit Luer-Lock-Anschluss und verriegeln Sie die Nadel durch Drehen im Uhrzeigersinn.



**Anmerkung:** Vergewissern Sie sich, dass die Nadel richtig auf der Spritze eingerastet ist.



4. Stellen Sie fest, wo sich die 4 Tiefenmarkierungen (18 mm, 19 mm, 20 mm und 22 mm) auf der Nadel befinden, um Ihre Arbeitslänge einzuhalten.



**Anmerkung:** Zur Anzeige der Arbeitslänge kann ein Stopper verwendet werden.

**Erstmaliger Benutzer:** Überprüfen Sie vor dem Gebrauch den Druck, der auf den Spritzenzylinder ausgeübt werden muss, um zwei ausgewogene Strahlen zu erzeugen, die aus der Nadel austreten. Dieser Schritt ermöglicht es Ihnen auch, die Fließfähigkeit Ihrer Spüllösung zu kontrollieren.

# Spülung



**Anmerkung:** Falls erforderlich, biegen Sie die Spitze vor, um leicht in den Kanal zu gelangen.



5. Beginnen Sie die Spülung in der Pulpahöhle und führen Sie die Nadel vorsichtig in die Kanalöffnung ein.



**Anmerkung:** Vermeiden Sie es, mit der Nadelspitze den Boden der Pulpahöhle zu berühren, um Schäden an den Back-to-Back-Öffnungen zu vermeiden.



6. Die Spitze der Nadel gleitet leicht nach unten in den Kanal. Achten Sie darauf, Ihre Arbeitslänge einzuhalten.



**Anmerkung:** Achten Sie auch darauf, dass sich die Nadel frei bewegen kann, um einen konstanten Rückfluss der Spüllösung zu gewährleisten.



SMART PRODUCTS  
FOR ENDO LOVERS

## Wählen Sie Ihre Produktreferenz

	Ref.	Unverbindliche Preisempfehlung
20ER PACKUNG	21400	37.80 CHF   €
40ER PACKUNG	21401	63.00 CHF   €



[pd-irriflex.com](http://pd-irriflex.com)

Bei dieser Kurzbedienungsanleitung handelt es sich um eine vereinfachte Version der Gebrauchsanweisung (IFU), in der die wichtigsten Punkte für die Verwendung hervorgehoben und zusammengefasst werden. Bitte beziehen Sie sich immer auf die offizielle IFU, die den physischen Produkten beiliegt oder auf der Website zu finden ist. Nur die IFU ist verbindlich.



Rue des Bosquets 18  
1800 Vevey  
Switzerland



**Produits Dentaires SA**  
Rue des Bosquets 18  
1800 Vevey . Switzerland



+41 21 921 26 31



[info@pd-dental.com](mailto:info@pd-dental.com)



1639

