




SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS

IrriFlex®

Quick User Guide

Ago per irrigazione canalare flessibile
monouso da 30 G con 2 prese d'aria laterali,
una per ogni lato

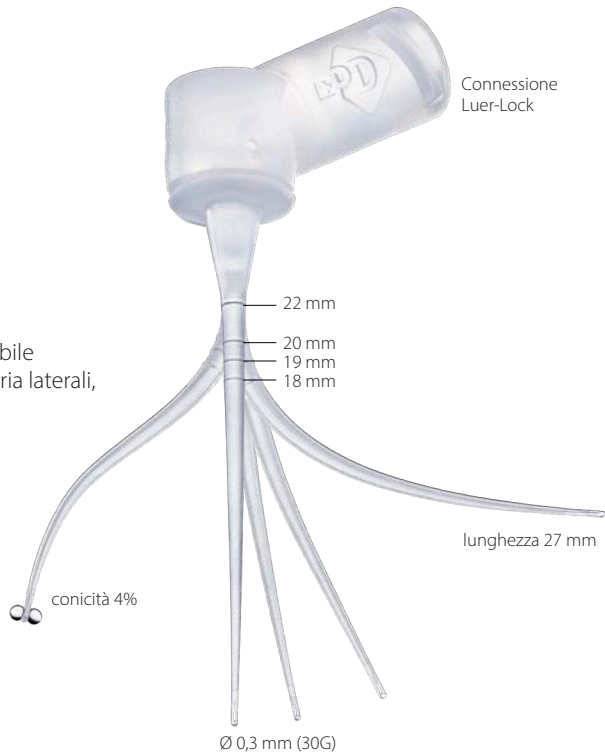

Istruzioni per l'impostazione



1. Aprire l'imballo tirando la tacca pretagliata prevista a tale scopo.
2. Priempire la siringa Luer-lock con uno dei fluidi compatibili: NaOCl stabilizzato (riscaldato) fino al 6%, EDTA 17%, clorexidina digluconato 2%, acido citrico fino al 40%, acqua distillata.



Nota: Dual Rinse® HEDP è anche una soluzione compatibile.



3. Inserire la parte di raccordo dell'ago nel naso maschio della siringa Luer-lock precedentemente riempita e bloccare l'ago ruotandolo in senso orario.



Nota: Assicurarsi che l'ago sia correttamente bloccato sulla siringa.



4. Individuare i 4 segni di profondità sull'ago (18 mm, 19 mm, 20 mm e 22 mm) per rispettare la propria lunghezza di lavoro.



Nota: È possibile utilizzare un fermo per indicare la lunghezza di lavoro.

Se si usa il prodotto per la prima volta:

Prima dell'uso, controllare la pressione necessaria sul cilindro della siringa per creare due getti bilanciati in uscita dall'ago. Questo passaggio consente inoltre di controllare la fluidità della soluzione di irrigazione.

Irrigazione



Nota: Se necessario, piegare prima la punta per accedere facilmente al canale.



5. Iniziare a irrigare nella camera pulpare e inserire delicatamente l'ago nell'orifizio del canale.



Nota: Evitare di colpire il pavimento della camera pulpare con la punta dell'ago per evitare danni alle prese d'aria situate su ciascun lato.



6. La punta dell'ago scorre facilmente lungo il canale. Assicurarsi di rispettare la propria lunghezza di lavoro.



Nota: Assicurarsi inoltre che l'ago possa muoversi liberamente per garantire un riflusso costante della soluzione di irrigazione.




SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS

Riferimenti del prodotto

	Ref.	Prezzo al dettaglio consigliato
SCATOLA DI 20 PEZZI	21400	CHF 36.00 / EUR 33.35
SCATOLA DI 40 PEZZI	21401	CHF 60.00 / EUR 55.55



pd-irriflex.com

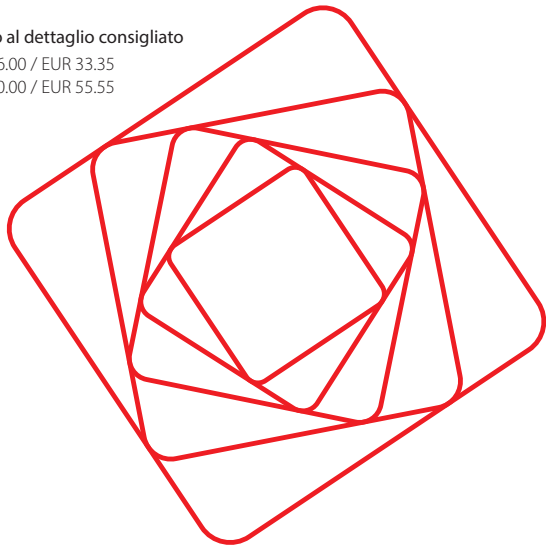

Rue des Bosquets 18
1800 Vevey
Switzerland



+41 21 921 26 31



info@pd-dental.com



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18
1800 Vevey . Switzerland



1639